



# WipeClean Ethanol Disinfection 80%

## Desinfektionsklud



Engangsklud til nem og hurtig desinfektion af overflader, der tåler alkohol.

### Anvendelsesområde

Beregnet til overfladedesinfektion af rene, mindre overflader, der tåler alkohol. Ikke velegnet til brug på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

Effektiv mod bl.a. M. norovirus. PT2 og PT4 biocidprodukt til professionel brug. Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under J.nr.: 2015-29-7105-00105. Produktet virker baktericidt og fungicidt. Der er givet dispensation for efterskyl med vand.

Velegnet til brug på hospitaler, plejecentre, hjemmeplejen, klinikker, tandlæger, dyrlæger, restauranter, køkkener, kontormiljøer samt i biler og andre transportmidler.

TIL PROFESSIONEL BRUG

### Produktegenskaber

Engangsklud til nem og hurtig overfladedesinfektion. Kludene indeholder den rette mængde desinfektionsvæske og er klar til brug lige fra pakken. Indeholder 80% denatureret ethanol (denatureret med IPA). Uparfumeret. Godkendt til brug i fødevarer virksomheder uden efterskyl med vand.

De bløde og behagelige klude er fremstillet af polyester, og er designet til at efterlade væsken på overfladen. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

Kludene er pakket i lufttætte forpackninger med nem lukning som sikrer, at de ikke tørrer ud. Kludene er foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis, klar til brug.

WipeClean Ethanol Disinfection 80% findes i følgende størrelser:

5252 Mini: 20 x 20 cm. rækker til 0,5 m<sup>2</sup>

5211 Small: 20 x 30 cm. der rækker til 1 m<sup>2</sup>

5212 Large: 30 x 40 cm. der rækker til 2,5 m<sup>2</sup>

Opfylder kravene i EN14885 og har dokumenteret baktericidal, mykobactericidal, fungicidal og virucidal effekt. Produktet er derfor bl.a. virksomt mod Coronavirus, M. norovirus og Adenovirus.

Vurderet af CEI til Intermediate level desinfektion.

Godkendt af Fødevarestyrelsen J.nr: 2015-29-7105-00105.

**Brugsanvisning**

Kludene er klar til brug og skal anvendes på rengjorte og tørre overflader. Benyt personlige værnemidler i henhold til lokale arbejdsinstruktioner. Brug en klud til at desinficere, hold kluden fladt og tør overfladen af i S-form, så hele overfladen er våd. Brug en ny klud hvis kluden bliver snavset eller tør. Ved synligt snavsede overflader rengøres overfladen inden desinfektion. Må ikke anvendes på overflader, der er følsomme overfor alkohol. Lad overfladen tørre naturligt i overensstemmelse med den angivne kontakttid. Kræver hverken efterbehandling eller efterskyl med vand. Genbrug ikke en klud. Luk altid emballagen efter brug.

Ikke beregnet til håndhygiejne.

Test standard	Claim	Test organism	Contact time
EN16615	Bactericidal Effect	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min
EN13727	Bactericidal Effect	P. aeruginosa S. aureus E. hirae	1 min
EN13697	Bactericidal Effect	P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae	1 min
EN13697	Fungicidal Effect	A. brasiliensis C. albicans	2 min
EN13624	Fungicidal Effect	A. brasiliensis C. albicans	2 min
EN13624	Yeasticidal Effect	C. albicans	1 min
EN16615	Yeasticidal Effect	C. albicans	1 min
EN14348	Tuberculocidal/Mycobactericidal Effect	M. terrae M. avium	1 min
EN14476	Virucidal Effect	Adenovirus M. norovirus	1 min

**Indhold**

Ingrediens	Effekt
Denatureret ethanol	80% Aktivt stof

**Opbevaring**

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.  
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, 30 dage fra åbning.

**Udseende og duft**

Uden farve og parfume.

**Produktionsland**

STORBRITANNIEN

**Anvendelses- og miljø sikkerhed**

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk).

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

**Emballagematerialer**

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.

På [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)	Forpakning
-----------------------------------	------------	------------	------	-------------------	------------

12 x 20 stk		5212	5701684521229	5701684521212	Wipes
-------------	--	------	---------------	---------------	-------

20 x 25 stk		5211	5701684521120	5701684521113	Wipes
-------------	--	------	---------------	---------------	-------

12 x 100 stk		5252	5701684525227	5701684525210	Wipes
--------------	--	------	---------------	---------------	-------

**Standard tilbehør**

WipeClean Ethanol Disinfection 80% Mini	4114 Væggholder til WipeClean Mini
---	------------------------------------

WipeClean Ethanol Disinfection 80% Small	4112 Væggholder til WipeClean Small
--	-------------------------------------

WipeClean Ethanol Disinfection 80% Large	4113 Væggholder til WipeClean Large
--	-------------------------------------

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) eller send en mail til kundeservice på [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com).